

Ny versjon av kartleggingen: "DAS - Dyadic Adjustment Scale"

Kjære kunder,

En ny versjon 4.0 av "DAS - Dyadic Adjustment Scale" er nå tilgjengelig i EG CheckWare sitt kartleggingsbiblotek.

Endringer i den nye versjonen:

1. Endring av rettighetshaver og en endring i opphavsrettsmerknaden.

Viktig!

- Oppdatering av DAS gjøres manuelt ved å installere den nyeste versjonen (4.0) i EG CheckWare sitt kartleggingsbiblotek. Oppdateringen er irreversibel, det vil si at det ikke er mulig å gå tilbake til den tidligere versjonen av DAS etter at den nye versjonen er installert.
- Alle respondenter vil få tilgang til den nyeste versjonen av spørreskjemaet, og alle klinikere til den nyeste versjonen av rapporten etter at DAS er oppdatert. Merk at alle tidligere innsendte svar fortsatt vil være merket med den forrige versjonen av DAS (3.0).
- Kartleggingsplaner som allerede er startet, vil bruke den forrige versjonen av DAS. Kartleggingsplaner som starter etter at den oppdaterte versjonen er installert, vil inneholde den nyeste versjonen av DAS.
- Oppdateringen har ingen innvirkning på data som allerede er samlet inn, det vil si at du ikke vil miste eksisterende data.
- Oppdateringen vil ikke påvirke kontinuiteten i resultatene.

Eventuelle spørsmål om endringer kan sendes direkte til support@checkware.com.

Med vennlig hilsen,

EG CheckWare